


# Ziel-Neehlsen Fite - osoitusvärjäyskitti 100 näytteelle

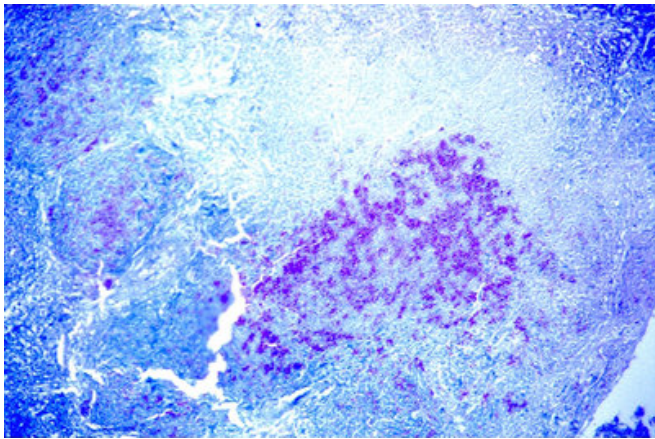

**SISÄLTÖ:** Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. Se on käyttövalmis tuote, joka on suunniteltu n. 100 solu- tai kudoksenäytelasin valmistamiseksi Fiehl-Neelsen Fite -värjäyksellä valomikroskopointia varten. Tuote sisältää valmiin värjäysohjeen ja seuraavat reagenssit (4 x 30 ml): Perjodihappo 30 ml, Karbolifukuksiini -liuos 30 ml, Happo-differentaatioliuos 30 ml ja Metyleenisini-väriaine 30 ml. Bio-Optican tuotteet valmistetaan ISO 13485:2016 -laatu järjestelmän mukaisesti. **KÄYTTÖ:** Patogeenisten mykobakteerien osoittaminen kudosleikkeistä, yskösnäytteistä ja muista mikrobiologista viljelynäytteistä. Valmistajan antama ohjeellinen värjäysaika on 45 min. **PERIAATE:** Happamassa liuoksessa karbolifukuksiini-väriaine kiinnittyy hapon kestävien bakteerien spesifisiin ja paksuihin lipidikapseleihin. Happo-differentaatioliuos irrottaa karbolifukuksiinin muista solu- ja bakteerirakenteista.

Metyleenisini-väriaine sitoutuu lima- ja kudoksiin, soluihin ja mikrobeihin. **TULOS:** Hapon kestävät bakteerit ja muut hapon kestävät rakenteet - punainen. Tausta - sininen. **SÄILYTYS:** Kuivassa, huoneenlämmössä. Tuotteen säilyvyys on 2 vuotta.

Mediqin tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi	Lisätiedot
1703470		1 kitti	04-111802		Tehdastilaustuote