


Ziehl-Neelsen - osoitusvärjäyskitti 100 näytteelle

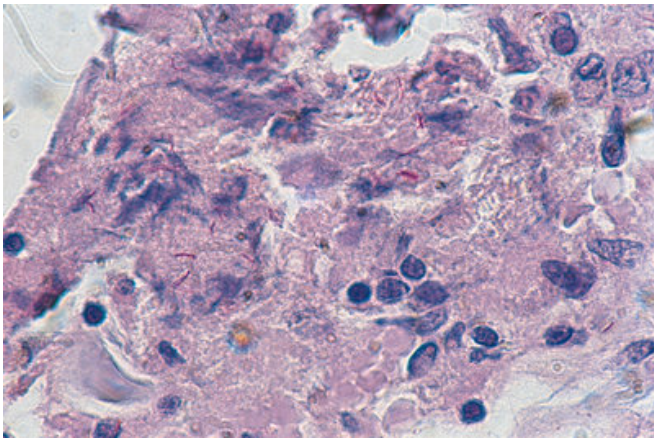

SISÄLTÖ: Tuote on CE -merkitty lääkinällinen laite. Se on käyttövalmis tuote, joka on suunniteltu n. 100 solu- tai kudoksenäyteläsin valmistamiseksi Fiehl-Neelsen -värjäyksellä valomikroskopointia varten. Tuote sisältää valmiin värjäysohjeen ja seuraavat reagenssit (4 x 30 ml): Perjodihappo 30 ml, Karbolifukuksiini -liuos 30 ml, Happo-differentaatioliuos 30 ml ja Mayer Hemalum -väriaine 30 ml. Bio-Optican tuotteet valmistetaan ISO 13485:2016 -laatu järjestelmän mukaisesti. **KÄYTTÖ:** Patogeenisten mykobakteerien osoittaminen kudoksetä, yskösnäytteistä ja muista mikrobiologista viljelynäytteistä. Valmistajan antama ohjeellinen värjäysaika on 50 min. **PERIAATE:** Happamassa liuoksessa karbolifukuksiini -väriaine kiinnittyy hapon kestävien bakteerien spesifisiin ja paksuihin lipidikapseleihin. Happo-differentaatioliuos irrottaa karbolifukuksiinin muista solu- ja bak-

teerirakenteista. Mayer Hemalum -väriaine sitoutuu kudosten ja solujen tumiin. **TULOS:** Hapon kestävät bakteerit ja muut hapon kestävät rakenteet - punainen. Tumat - sininen. **SÄILYTYS:** Kuivassa, huoneenlämmössä. Tuotteen säilyvyys on 2 vuotta.

Mediqin tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi	Lisätiedot
1703472		1 kitti	04-110802		Tehdastilaustuote