


Perls (Berliininsini) - osoitusvärjäyskitti 100 näytteelle

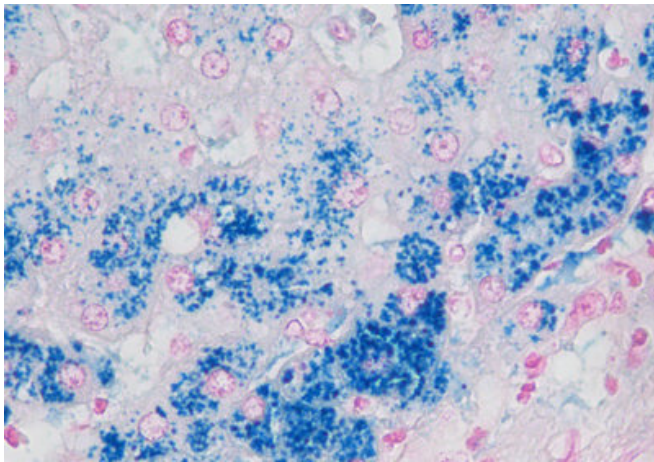

huoneenlämmössä. Tuotteen säilyvyys on 2 vuotta.

SISÄLTÖ: Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. Se on käyttövalmis tuote, joka on suunniteltu n. 100 solu- tai kudoksenäytelasien valmistamiseksi Perls (Berliininsini, BS) -värjäyksellä valomikroskopointia varten. Tuote sisältää valmiin värjäysohjeen ja seuraavat reagenssit: Kaliumferrosyanidiliuos 30 ml, Happo-aktiivointipuskuri 30 ml ja Mayerin Carmalum -väriaine 30 ml. Bio-Optican tuotteet valmistetaan ISO 13485:2016 -laatu järjestelmän mukaisesti. **KÄYTTÖ:** Varastoraudan eli Ferri (Fe+3) -ionien osoittaminen kudoksenleikkeestä. Valmistajan antama ohjeellinen värjäysaika on 35 min. **PERIAATE:** Happamassa ympäristössä kudoksen hemosideriinin ferri-ionit reagoivat kaliumferrosyanidi-liuoksen kanssa, kelatoituvat ja muodostavat liukenemattoman sinisen väriyhdisteen ferriferrosyanidin eli berliininsinin. Mayerin Carmalum -väriaine sitoutuu tumiin. **TULOS:** Reaktiiviset ferri-ionit - sininen. Tumat - punainen. **SÄILYTYS:** Kuivassa,

Mediqin tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi	Lisätiedot
1703668		1 kitti	04-180807		Tehdastilaustuote