


Weigert-Van Gieson - osoitusvärjäyskitti 100 näytteelle

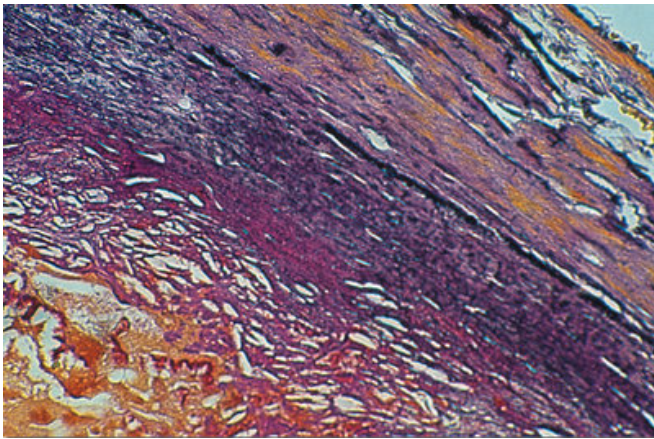

SISÄLTÖ: Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. Se on käyttövalmis tuote, joka on suunniteltu n. 100 kudoksenäytteen valmistamiseksi Weigert-Van Gieson -värjäyksellä valomikroskopointia varten. Tuote sisältää valmiin värjäysohjeen ja seuraavat reagenssit: Perjodihappo 30 ml, Alkoholi-liuos inkubointilaa-tikkoon 2 x 30 ml, Weigert fuksiini-resorsiini -väriliuos 30 ml, Happodifferentaatio-puskuriliuos 30 ml, Weigert rautahematoksyliini A -liuos 30 ml, Weigert rautahematoksyliini B -liuos 30 ml ja Van Gieson pikrofuksiiniliuos 30 ml. Bio-Optican tuotteet valmistetaan ISO 13485:2016 -laatu järjestelmän mukaisesti. **KÄYTTÖ:** Sidekudoksen, elastisten säikeiden ja tumien osoittamiseksi kudosten leikkeistä. Tuotetta soveltuu erinomaisesti kardiovaskulaariseen patologiaan. Valmistajan antama ohjeellinen värjäysaika 20 min.

PERIAATE: Kolmen väriaineen värjäyksessä Weigert fuksiini-resorsiini sitoutuu elastisiin säikeisiin ja kollageeniin, Weigert rautahematoksyliini sitoutuu kudosten solujen tumiin. Van Gieson pikrofuksiini trikromisena värinä erottelee kudoksen värjättyt tumat esille, fuksiini sitoutuu kollageeniin ja pikriinihappo sitoutuu sidekudokseen ja punasoluihin. **TULOS:** Elastiset säikeet - purppurapunaisesta ruskeaan. Tumat - musta. Kollageeni - punaisen eri sävyt. Sidekudos ja punasolut - keltainen. **SÄILYTYS:** Kuivassa, huoneenlämmössä. Tuotteen säilyvyys on 2 vuotta.

| Mediqin tuotenumero | Koko | Myyntiyksikkö | Valmistajan tuotekoodi | Sailab-koodi |
|---------------------|------|---------------|------------------------|--------------|
| 1704143 | | 1 kitti | 04-053812 | |