


# Alcian Blue pH 2,5 - osoitusvärjäyskitti 100 näytteelle

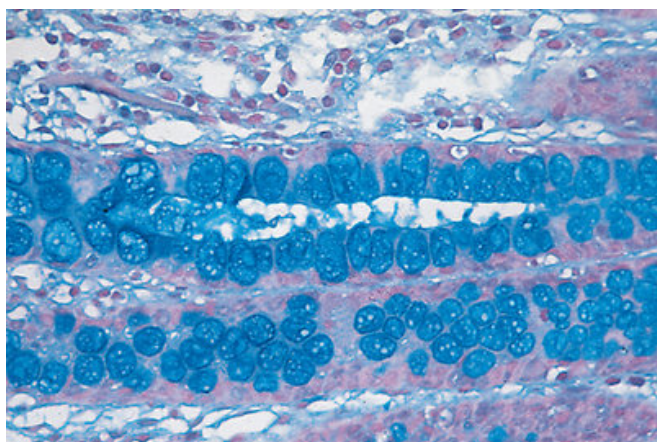

**SISÄLTÖ:** Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. Se on käyttövalmis tuote, joka on suunniteltu n. 100 solu- tai kudoksenäytelasin valmistamiseksi Alcian Blue pH 2,5 -värjäyksellä valomikroskopointia varten. Tuote sisältää valmiin värjäysohjeen ja seuraavat reagenssit: Mowry Alcian Blue pH 2,5 -väriliuos 30 ml, Natriumtetraboraatti -liuos 30 ml, Mayer Carmalum -väriliuos 30 ml. Bio-Optican tuotteet valmistetaan ISO 13485:2016 -laatu järjestelmän mukaisesti. **KÄYTTÖ:** Happamien mukopolysakkaridien osoittaminen kudoksenleikkeestä. Valmistajan antama ohjeellinen värjäysaika on 50 min. **PERIAATE:** Mowryn Alcian Blue pH 2,5 -väriaine reagoi kationisena värinä happamien mukopolysakkaridien anionisten ja reaktiivisten rikki- ja karbonyyliryhmien kanssa. Natriumtetraboraatti muuttaa Mowryn Alcian Blue -väriliuoksen liukenemattomaksi Monastral Blue -väriaineeksi. Mayerin Carmalum -väriaine sitoutuu

kudoksen tumiin. **TULOS:** Happamat mukopolysakkaridit - turkoosin sininen. Tumat - punainen. **SÄILYTYS:** Kuivassa, huoneenlämmössä. Tuotteen säilyvyys on 2 vuotta.

Mediqin tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi	Lisätiedot
1704147		1 kitti	04-160802		Tehdastilaustuote