


Mucicarmine-osoitusvärjäyskitti 100 näytteelle

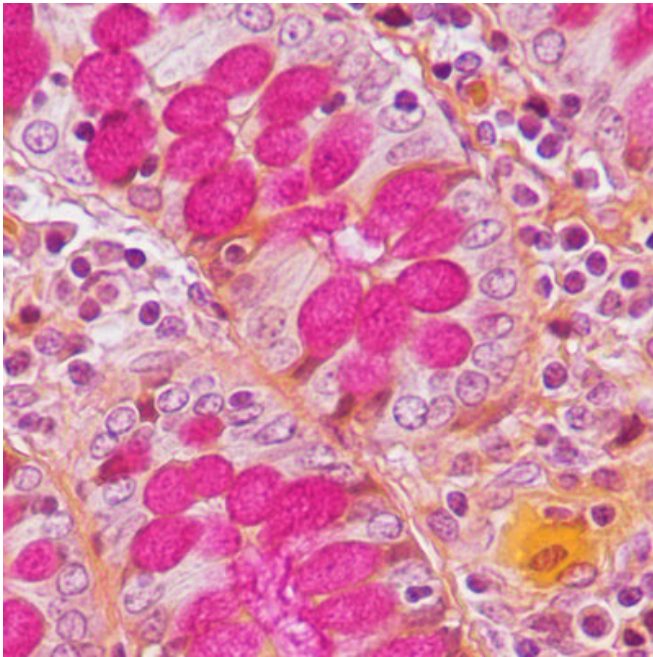

SISÄLTÖ: Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. Se on käyttövalmis tuote, joka on suunniteltu n. 100 solu- tai kudospäyteläsin valmistamiseksi Mayerin musikarmiini -värjäyksellä valomikroskopointia varten. Tuote sisältää valmiin värjäysohjeen ja seuraavat reagenssit: Mayerin Hemalum -väriliuos 30 ml, Mayerin Mucicarmine -väriliuos 30 ml ja Orange G -väriliuos 30 ml. Bio-Optican tuotteet valmistetaan ISO 13485:2016 -laatu järjestelmän mukaisesti.

KÄYTTÖ: Epitelialaista alkuperää olevien musiinien eli mukopolysakkaridien osoittaminen kudospäytelästä. Valmistajan antama ohjeellinen värjäysaika on 50 min.

PERIAATE: Kokeellinen värjäysmenetelmä, jonka histokemiallinen prosessi on vielä tuntematon. Musikarmiini-väriaine on kuitenkin suhteellisen spesifinen epitelialaisille musiineille, sillä fibroplasteista peräisin olevat musiinit värjäytyvät huonosti.

TULOS: Epitelialaiset musiinit - vaaleanpunainen - tumman violetti. Tumat - sinivioletti. Muut kudospäyteläsin - keltaoranssi.

SÄILYTYS: Kuivassa, 2 - 8 °C. Tuotteen säilyvyys on 1 vuosi.

Mediqin tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotekoodi	Sailab-koodi	Lisätiedot
1704150		1 kitti	04-190812		Tehdastilaustuote